

OTRIVIN ZOUTOPLOSSING

Neusspray

Isotone Zoutoplossing met 0.74% natriumchloride

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voor u Otrivin Zoutoplossing gebruikt. Indien u nog vragen heeft, stel deze dan aan uw arts, apotheker of drogist.

Als een gevolg van opeenhoping van slijm, korstvorming en droogheid van het neusslijmvlies hebben baby's, kinderen en volwassenen soms moeite met ademhaling. Een overvloedige slijmproductie komt voornamelijk voor bij baby's en is een algemeen teken van een verstopte neus, of een loopneus bij verkoudheid. Aangezien de baby zelf het neusslijm nog niet kan verwijderen door het neusje te snuiten, kan hij – in deze situaties – moeite met ademen, eten en slapen hebben en daarom geïrriteerd en onrustig zijn.

De neus reinigen met behulp van een zoutoplossing kan helpen om een verstopte neus te voorkomen en te verlichten.

1. Wat is Otrivin Zoutoplossing en waarvoor wordt het gebruikt?

Otrivin Zoutoplossing is een isotone zoutoplossing. De zoutconcentratie is aangepast om neusirritatie te voorkomen. De oplossing bevat ricinusolie welke bekend is om zijn hydraterende en verzachtende eigenschappen.

Daarom wordt Otrivin Zoutoplossing aanbevolen om:

- zachtjes de neusholten te reinigen wanneer deze verstopt zijn (bv. tijdens een verkoudheid) of bij allergische aandoeningen, door het wegwassen van het overtollige slijm of de allergische deeltjes zoals stof of stuifmeel.
- het geïrriteerde of droge neusslijmvlies te hydrateren als gevolg van een lage luchtvochtigheid (bv. als gevolg van verwarmde ruimtes, ruimtes met airconditioning, bij grote hoogte, vlieguren) of als gevolg van andere lichte neusirritaties.
- ingedikt neusslijm vloeibaar te maken, waardoor dit makkelijker te verwijderen is.

2. Voor u Otrivin Zoutoplossing gebruikt

Otrivin Zoutoplossing bevat benzalkoniumchloride, dat een lokale allergische reactie kan veroorzaken bij diegenen die gevoelig zijn voor deze stof.

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

Gebruik geen gebroken of beschadigde neusspray.

Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen wanneer het product gebruikt wordt waarvoor het bestemd is. Men dient echter een arts te consulteren als men Otrivin Zoutoplossing wil gebruiken na een neusoperatie of een kwetsuur ter hoogte van de neus.

Omwille van zijn reinigende eigenschappen, kunt u Otrivin Zoutoplossing het beste eerst gebruiken wanneer u of uw baby of kind ook een geneesmiddel via de neus moet innemen (bv. bij verkoudheid of allergische rhinitis).

Otrivin Zoutoplossing kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

3. Hoe gebruikt u Otrivin Zoutoplossing?

Geschikt voor zuigelingen, kinderen en volwassenen. Het is aangeraden om medisch advies in te winnen alvorens het te gebruiken bij zuigelingen jonger dan 2 weken.

Voor zuigelingen en peuters (tot 2 jaar): 1 verstuiwing in elk neusgat naar behoefte.

Voor volwassenen en kinderen (ouder dan 2 jaar): 1 tot 2 verstuiwingen in elk neusgat naar behoefte.

De gebruikelijke frequentie van toepassing is 2 tot 4 maal per dag per neusgat.

1. De neus snuiten indien nodig.
2. Verwijder het beschermende dopje van de neusspray. Plaats de duim onderaan het flesje en de verstuiver tussen de wijsvinger en middenvinger. Bij het eerste gebruik dient men de neusspray eerst een aantal keer in de lucht te verstuiven om een gelijkmatige verstuiwing te krijgen. De neusspray is dan klaar voor gebruik.
3. Breng de punt van de neusspray voorzichtig in de neusgat. Verstuif en adem tegelijkertijd in via de neus. Herhaal in het andere neusgat.
4. Maak de verstuiver schoon en houd hem droog na gebruik. Plaats het beschermende dopje terug.

Om hygiënische redenen en om infecties te vermijden, mag de neusspray slechts door één en dezelfde persoon gebruikt worden.

4. Voor uw veiligheid

Onder normale gebruiksomstandigheden, zoals aangegeven, wordt Otrivin Zoutoplossing heel goed verdragen. Indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit product, contacteer dan uw arts of apotheker of drogist.

5. Hoe bewaart u Otrivin Zoutoplossing?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Niet gebruiken na de vervaldatum welke vermeld staat op de verpakking.

Bewaar onder 30°C. Bescherm tegen hitte. Bewaar de neusspray in de originele verpakking.

6. Verdere informatie

Samenstelling: 0.74% natriumchloride, benzalkoniumchloride (bewaarmiddel), dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, PEG-40 gehydrogeneerde ricinusolie, dinatriumfosfaat en gezuiverd water.

Otrivin Zoutoplossing is beschikbaar als een neuspray van 15 ml.



Novartis Consumer Health S.A., Route de l'Etraz, CH-1260 Nyon, Zwitserland.

Verdeeld door Novartis Consumer Health B.V., Claudius Prinsenlaan 142, 4818 CP Breda, Nederland.



medisch hulpmiddel

Datum: Oktober 2013.

www.otrivin.nl