

Clearblue

Zwangerschapstest PLUS

Nederlands

Clearblue PLUS is meer dan 99% nauwkeurig vanaf de eerste dag dat uw menstruatie te laat is.

Clearblue PLUS kan worden gebruikt tot 4 dagen vóór uw menstruatieperiode.

Lees deze folder goed voordat u een test uitvoert.

Voor u begint

Het kan handig zijn om een horloge/uurwerk in de buurt te hebben wanneer u de test uitvoert.

1 EEN TEST UITVOEREN

Indien u test vanaf de dag dat uw menstruatieperiode te laat is, kunt u op elk moment van de dag testen. Indien u vooraf test, moet u de eerste urine van de dag gebruiken.

• Wanneer u klaar bent om de test uit te voeren, neemt u de teststick uit de verpakkingfolie en verwijdt u het blauwe kapje. Gebruik de teststick onmiddellijk.

TEST UW URINE

U kunt de teststrip rechtstreeks in uw urinestraal houden of in een beetje urine die u hebt opgevangen in een schoon, droog glas of potje.

• Houd het van kleur veranderend uiteinde zoals aangegeven omlaag in uw urinestraal **of** in uw verzameld urinemonster gedurende **5 seconden**.



- Het van kleur veranderend uiteinde wordt onmiddellijk roze om aan te tonen dat urine wordt geabsorbeerd. **U moet het van kleur veranderend uiteinde vijf seconden lang in de urine houden.**



- Houd het van kleur veranderend uiteinde omlaag of leg de teststick plat tot u het resultaat kunt lezen en er een blauwe streep verschijnt in het controlevenster.
- U kunt het kapje terugplaatsen.

Raadpleeg **vraag 7** indien het van kleur veranderend uiteinde niet volledig roze werd.




2 WACHT 3 minuten.

Terwijl de test begint te werken, ziet u blauwe streepjes verschijnen.

3 UW RESULTAAT AFLEZEN NA 3 MINUTEN

- U kunt nu uw resultaat aflezen in het resultaatvenster.
- **Wanneer u uw resultaat afleest, moet een blauw streepje in het controlevenster staan. Dit streepje toont aan dat de test is geslaagd.**
- Indien er binnen de **10 minuten** geen blauw streepje verschijnt in het controlevenster, is de test mislukt (raadpleeg **vraag 8**).

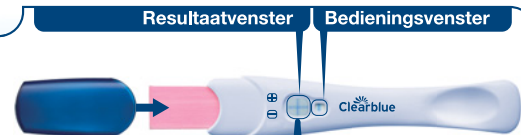

Niet Zwanger



Indien uw resultaat 'Niet Zwanger' is, raadpleeg dan **vraag 13** in Vragen en antwoorden.

Zwanger



Indien uw resultaat 'Zwanger' is, raadpleeg dan **vraag 14** in Vragen en antwoorden.



Indien uw resultaat 'Zwanger' is, raadpleeg dan **vraag 14** in Vragen en antwoorden.

Het maakt niet uit of één van de lijnen die het '+'-teken vormen lichter of donkerder is dan de andere; het resultaat is 'Zwanger'.

BELANGRIJK!

Lees uw resultaat binnen de **10 minuten** na het uitvoeren van de test. Houd geen rekening met resultaatwijzigingen na deze tijd.

Indien u niet zeker bent van uw resultaat, raadpleeg **vraag 9** voor alle details.

Vragen en Antwoorden

- 1 Hoe nauwkeurig is Clearblue PLUS?**
Clearblue PLUS is meer dan 99% nauwkeurig in laboratoriumtesten **vanaf de eerste dag dat uw menstruatie te laat is.**
- 2 Hoe werkt Clearblue PLUS?**
Wanneer u zwanger bent, produceert uw lichaam het zwangerschapshormoon hCG (human Chorionic Gonadotrophin – humaan choriongonadotrofine). De hoeveelheid hCG in uw lichaam verhoogt tijdens de eerste fasen van uw zwangerschap. Clearblue PLUS kan kleine hoeveelheden van dit hormoon in uw urine detecteren. (De gevoeligheid van deze test is 25mIU/mL).
- 3 Wanneer kan ik testen met Clearblue PLUS?**
Clearblue PLUS kan worden gebruikt tot 4 dagen vóór uw menstruatieperiode. Indien u test vóór uw menstruatieperiode gebruikt en u krijgt het resultaat 'Niet Zwanger', is er nog steeds een kans dat u zwanger bent. Bekijk de onderstaande tabel voor resultaten van het klinisch testen van Clearblue PLUS met monsters uit de vroege zwangerschap.
- Vroeg testen**
Clearblue beveelt aan dat u de test uitvoert, zodra uw menstruatie te laat is. Bij een vroege zwangerschap stijgt het zwangerschapshormoon echter snel tijdens de eerste dagen. Clearblue PLUS kan worden gebruikt om een test uit te voeren tot 4 dagen vóór uw normale menstruatie datum. Bij klinische testen met monsters van vroege zwangerschappen gaf Clearblue PLUS de volgende resultaten:
- | Aantal dagen voor de menstruatieperiode | -1 | -2 | -3 | -4 |
|--|------|------|------|------|
| % monsters van vrouwen dat het resultaat 'Zwanger' geeft | 98 % | 97 % | 88 % | 56 % |
- 4 Moet ik een urinemonster van 's ochtends vroeg gebruiken?**
Indien u test vóór uw menstruatieperiode, bevelen we u aan de test uit te voeren met uw eerste urine van de dag. In andere gevallen kunt u op elk moment van de dag testen. Vermijd overvloedige vloeistofopname voordat u de test uitvoert.
- 5 Ik ben niet zeker wanneer mijn volgende menstruatieperiode begint. Hoe weet ik dat ik op het juiste moment test?**
Om uit te rekenen wanneer uw menstruatieperiode begint, berekent u de gebruikelijke cyclustijd door het aantal dagen te tellen vanaf de eerste dag van uw menstruatieperiode tot de dag voordat de volgende menstruatieperiode begint.
- Indien u een onregelmatige cyclus hebt, moet u rekenen volgens de langste cyclus van de voorbije maanden voordat u test.
 - Indien u niet weet wanneer uw menstruatieperiode begint, bevelen we u aan niet vroeger te testen dan 19 dagen na de laatste keer dat u onbeschermde seks had.
 - Indien het resultaat 'Niet Zwanger' is maar er is nog steeds een vermoeden van zwangerschap, *raadpleeg dan vraag 13.*
- 6 Kan medicatie of een medische aandoening een invloed hebben op het resultaat?**
- Lees altijd de bijsluiter voordat u een test uitvoert.
 - Vruchtbaarheidsmedicatie die hCG bevat, kan misleidende resultaten geven (deze medicatie wordt meestal via een injectie toegediend en indien u te vroeg na het toedienen een test uitvoert, kan dit een foutief 'Zwanger' resultaat geven).
 - Andere vruchtbaarheidsbehandelingen (zoals clomifencitraat), pijnstillers en hormonale voorbehoedsmiddelen (bijv. anticonceptiepil) zouden geen invloed mogen hebben op het resultaat.
 - Indien u onlangs stopte met het gebruik van hormonale anticonceptie of indien u vruchtbaarheidsbehandeling gebruikt zoals clomifencitraat, kunnen uw menstruatieperiodes onregelmatig zijn waardoor u mogelijk

- te vroeg test.
- Indien u recent zwanger was (zelfs indien deze niet werd voldragen), kunt u een foutief 'Zwanger' resultaat krijgen.
 - Buitenbaarmoederlijke zwangerschap, ovariumcysten, menopauze en enkele zeldzame medische aandoeningen kunnen misleidende resultaten geven.
 - Indien u het resultaat 'Zwanger' krijgt, is het mogelijk dat later blijkt dat u niet zwanger bent door een natuurlijk verlies van de zwangerschap, wat zich kan voordoen tijdens de eerste fasen.
- Indien u onverwachte resultaten krijgt, moet u dit bespreken met uw dokter.
- 7 Ik heb de zwangerschapstest gebruikt maar het van kleur veranderend uiteinde werd niet volledig roze. Wat moet ik doen?**
Indien het van kleur veranderend uiteinde niet volledig roze werd, hebt u mogelijk onvoldoende urine aangebracht. Indien er echter binnen de 10 minuten na het uitvoeren van de test een blauw streepje verschijnt in het controlevenster, dan is de test geslaagd. Indien er binnen de 10 minuten na het uitvoeren van de test geen blauw streepje verschijnt in het controlevenster, *raadpleeg dan vraag 8.*
- 8 Ik heb de zwangerschapstest gebruikt maar er verscheen geen blauw streepje in het controlevenster. Wat moet ik doen?**
Indien er binnen de 10 minuten na het uitvoeren van de test geen blauw streepje verschijnt in het controlevenster, dan is de test niet geslaagd. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
- Het van kleur veranderend uiteinde werd niet omlaag gehouden of de teststick werd niet plat gelegd nadat de urine werd aangebracht.
 - Er werd teveel of te weinig urine gebruikt. **U moet gedurende 5 seconden een monster afnemen.**
- U moet opnieuw testen met een nieuwe teststick en de instructies nauwkeurig opvolgen. U verzamelt het best een monster van uw urine in een schoon, droog potje en u dompelt enkel het van kleur veranderend uiteinde gedurende 5 seconden onder.
- 9 Wat als ik niet zeker ben van mijn resultaten?**
- Voor een 'Zwanger' resultaat moet er binnen de 10 minuten na het uitvoeren van de test een blauwe streep in het controlevenster staan en een '+'-symbool in het resultaatvenster.
 - De weergave van het '+'-symbool in het resultaatvenster kan variëren. De streepjes die het '+'-symbool vormen en het streepje in het controlevenster moeten echter een gelijkaardige breedte hebben (zie afbeeldingen A-C).
- Afbeelding A**
Dit geeft een 'Zwanger' resultaat aan. Dit komt gemakkelijker voor indien

u test vóór uw menstruatieperiode wanneer de hoeveelheid hCG relatief laag is.

Afbeelding B

Dit is niet ongewoon indien u zwanger bent en de test uitvoert op of rond de dag waarop uw menstruatieperiode begint, aangezien de hoeveelheid hCG nog steeds relatief laag kan zijn.

Afbeelding C

Dit gebeurt meestal wanneer u zwanger bent en u meer dan enkele dagen na uw normale menstruatieperiode test, aangezien de hoeveelheid hCG dan hoger is.

Indien u nog steeds niet zeker bent van uw resultaat, moet u minstens 3 dagen wachten voordat u opnieuw test en dan goed de instructies volgen.

- Voor een 'Niet Zwanger' resultaat moet er binnen de 10 minuten na het uitvoeren van de test een blauwe streep in het controlevenster staan en een '-'-symbool in het resultaatvenster. Indien het resultaat 'Niet Zwanger' is maar er is nog steeds een vermoeden van zwangerschap, *raadpleeg dan vraag 13.*

10 Wat kan de nauwkeurigheid van het resultaat beïnvloeden?

Indien u eerder test dan uw normale menstruatieperiode, dan is de nauwkeurigheid van Clearblue PLUS lager. Indien u uw urine niet gedurende de juiste tijd test, krijgt u mogelijk geen betrouwbaar resultaat. Zolang u echter binnen de 10 minuten na de test een blauw streepje ziet in het controlevenster, kunt u zeker zijn van het resultaat. Indien u herhaaldelijk onverwachte resultaten krijgt, moet u dit bespreken met uw dokter. *Radpleeg ook vraag 6.*

11 Wanneer kan ik het resultaat lezen?

U kunt het resultaat na 3 minuten aflezen.

12 Hoe lang blijft het resultaat?

Het resultaat kan tussen de 3 en de 10 minuten afgelezen worden. U mag geen rekening houden met een wijziging van het resultaat na 10 minuten.

13 Mijn test zegt dat ik niet zwanger ben. Wat moet ik doen?

Mogelijk bent u niet zwanger of is de hoeveelheid zwangerschapshormoon te laag om te detecteren. Mogelijk hebt u de normale begin datum van uw menstruatieperiode verkeerd berekend.

- Indien u vroeg testte, moet u opnieuw testen wanneer uw menstruatie te laat is.
- Indien uw menstruatieperiode te laat is, moet u na 3 dagen opnieuw testen. Indien deze test het resultaat 'Niet Zwanger' geeft terwijl u nog steeds niet in uw menstruatieperiode bent, *raadpleeg dan uw dokter.*

14 Mijn test zegt dat ik zwanger ben. Wat moet ik doen?

Indien u test zegt dat u zwanger bent, moet u contact opnemen met uw dokter. Deze zal u laten weten wat u daarna moet doen.



Informatielijn

Onze adviseurs zijn voor u aanwezig ma t/m vrij van 8-16 uur behalve op feestdagen.

NL 0900 040 1254 BE 078 600 006

Gesprekskosten variëren, neem contact op met uw provider. Het LOT-nummer van de teststaafjesverpakking alstublieft gereed houden. Telefoonsgesprekken worden met het oog op de training en voor kwaliteitscontrole opgenomen. Als onze Nederlandstalige medewerker niet beschikbaar is, helpt ons Engelstalig team u graag verder.

IVD	In vitro diagnostisch medisch apparaat	LOT	Batchcode	Niet hergebruiken
	Temperatuuriemiet 2°C - 30°C		Te gebruiken tot	Fabrikant

Fabrikant: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Zwitserland.

© 2012 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. Alle rechten voorbehouden. Clearblue is een handelsmerk.

Voor volgende stappen, informatie en algemeen advies over zwangerschap kunt u onze website raadplegen op:

www.clearblue.com

Dit apparaat is bestemd voor thuisgebruik. Bewaren bij kamertemperatuur.

Laat het apparaat gedurende 30 minuten op kamertemperatuur komen indien u dit op lage temperatuur bewaart.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Enkel voor in vitro diagnostisch gebruik. Wegwerpen bij normaal huishoudafval. Niet gebruiken indien de verpakkingssfolie beschadigd is.

Gebruik geen teststick waarvan de vervaldatum reeds voorbij is.



0843